

1

Die Hände
waschen oder
desinfizieren.




2

Alle Testutensilien bereitlegen.



Bitte beachten:

Die abgebildeten Testutensilien sowie die Art der Testung sind nicht pauschal auf alle Tests übertragbar. Diese können abweichen. Deshalb bitten wir Sie, sich vorrangig an den Anleitungen der in Ihrer Einrichtung verwendeten Tests zu orientieren.

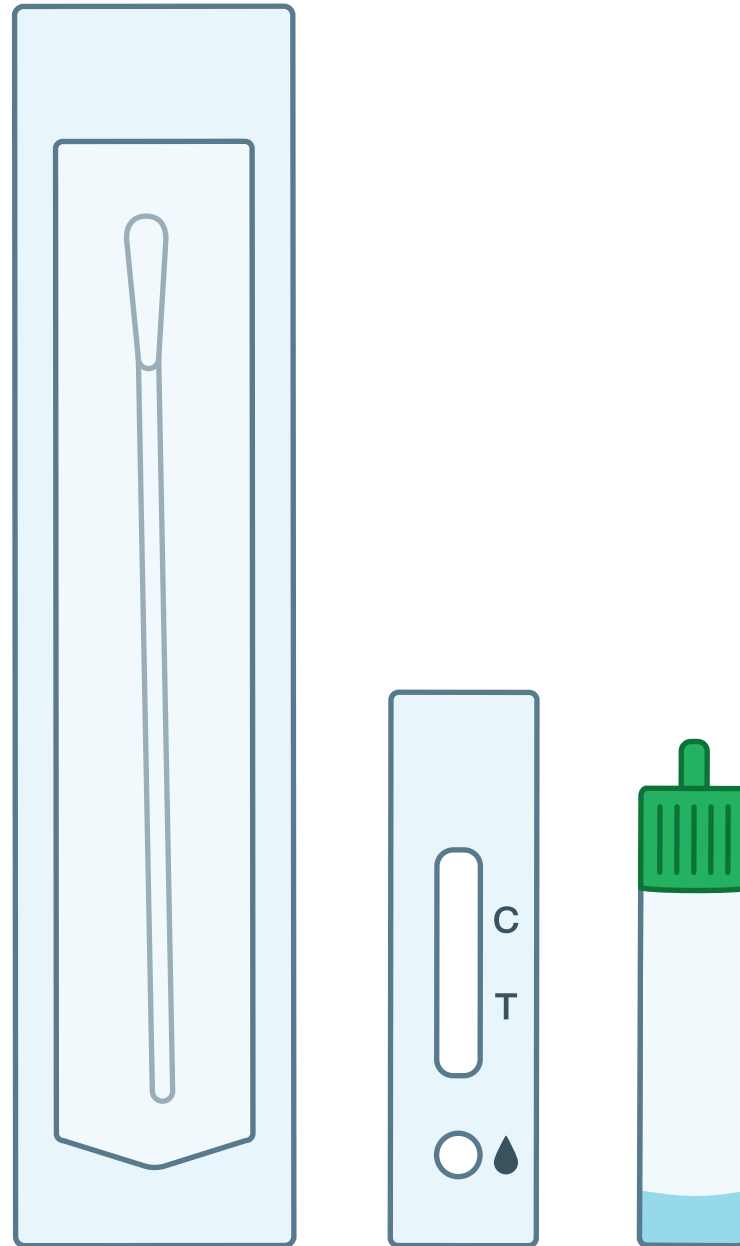


2

Alle
Testutensilien
bereitlegen.

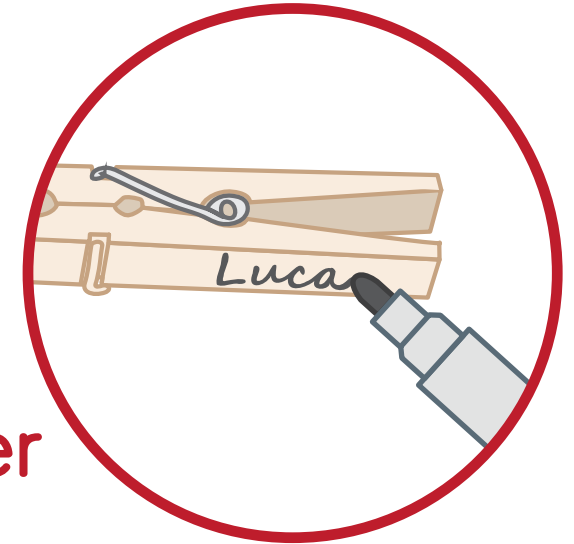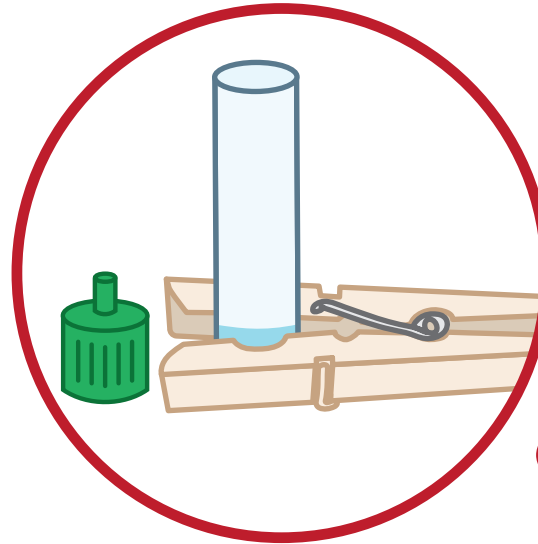

oder

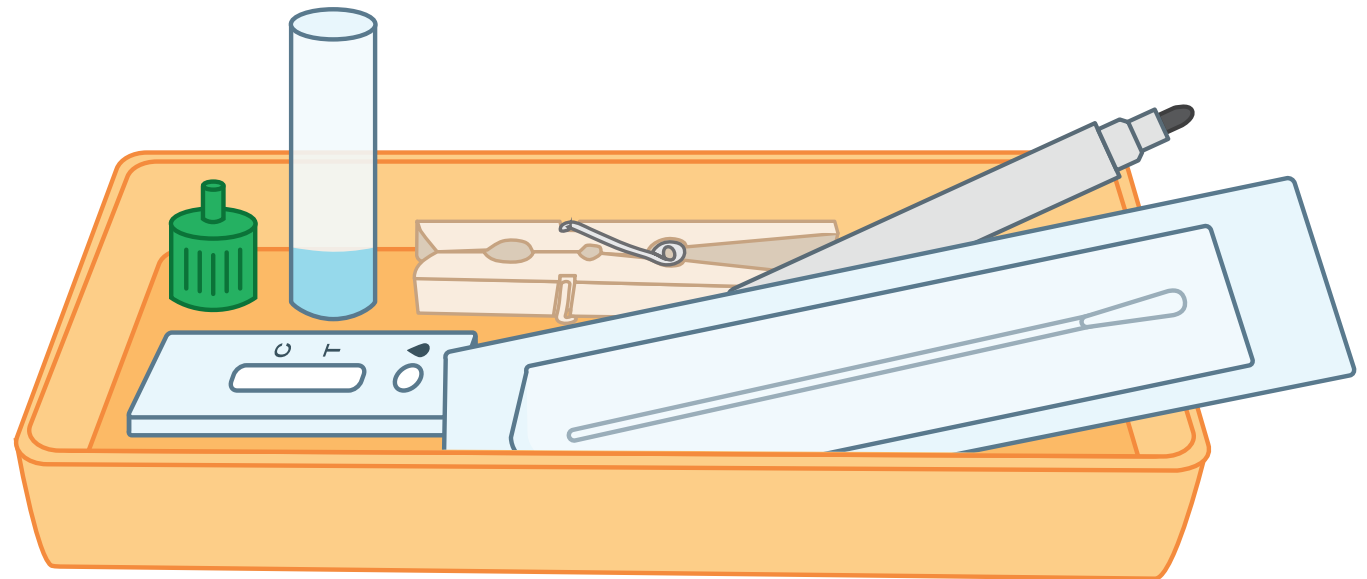


Bitte beachten:

Die abgebildeten Testutensilien sowie die Art der Testung sind nicht pauschal auf alle Tests übertragbar. Diese können abweichen. Deshalb bitten wir Sie, sich vorrangig an den Anleitungen der in Ihrer Einrichtung verwendeten Tests zu orientieren.

3

Umgang mit dem Tupfer

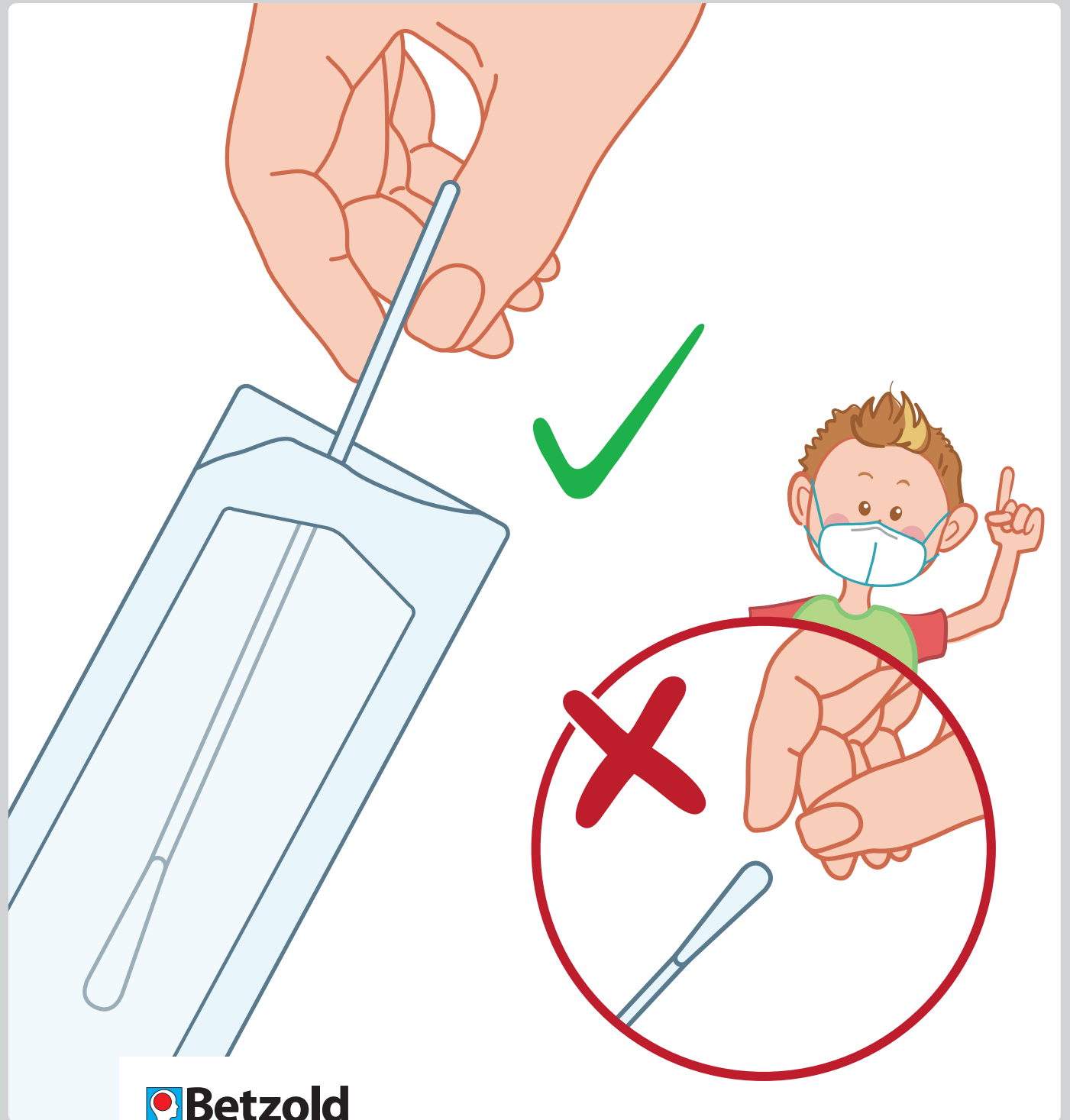


4

Jetzt darfst
du die Maske
absetzen.




5

Nasen-
abstrich
vornehmen.

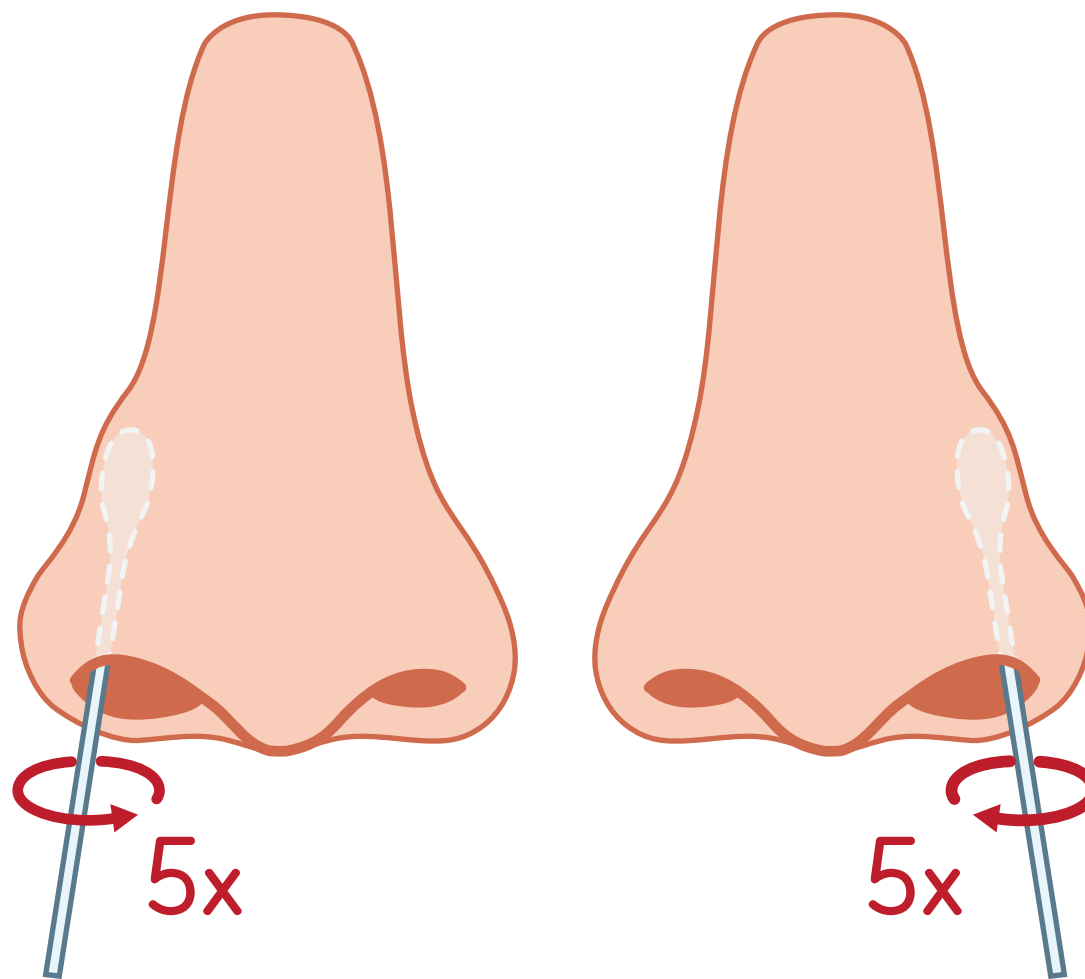


6

Eine Minute
vermischen.

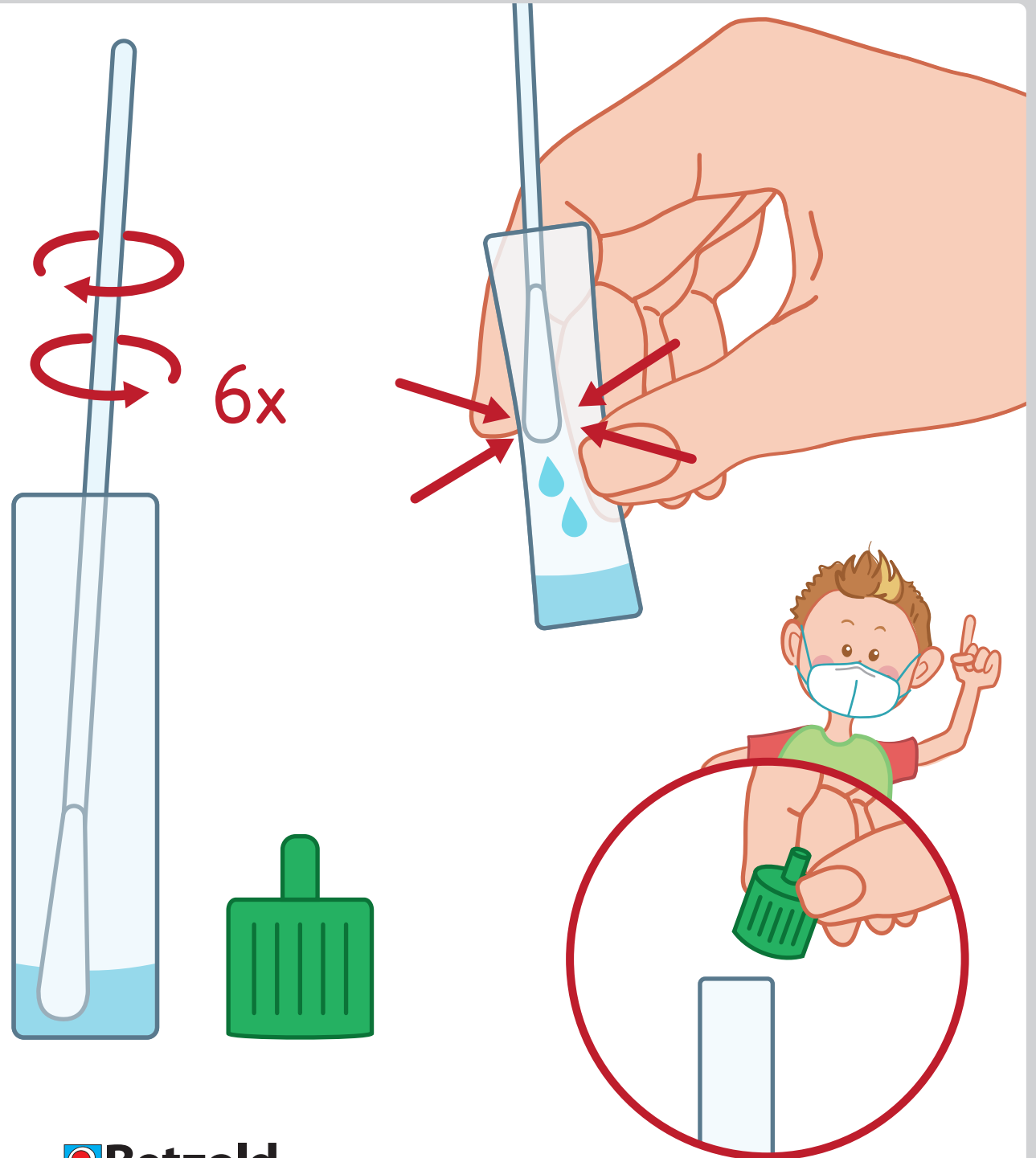

7

Tropfen auf
die Test-
kassette
geben.

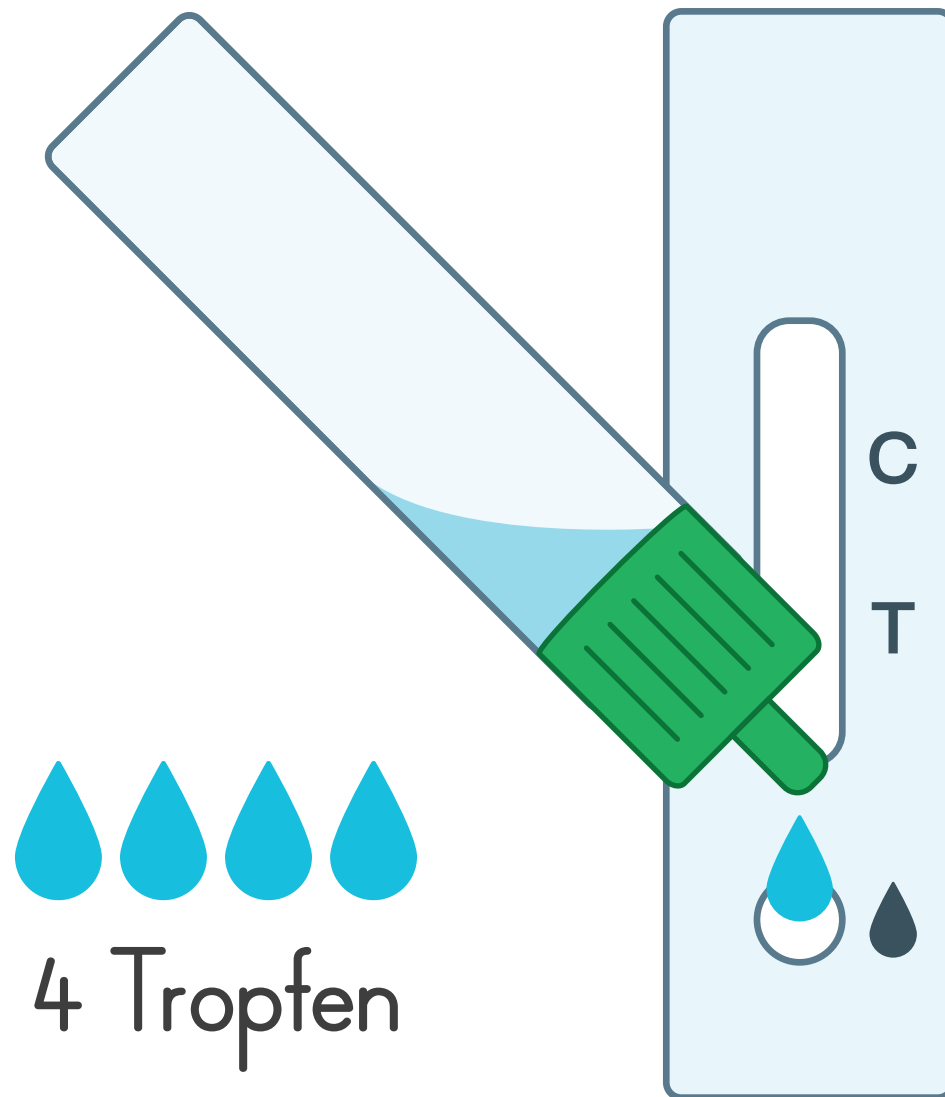


8

Setze nun
deine Maske
wieder auf.




9

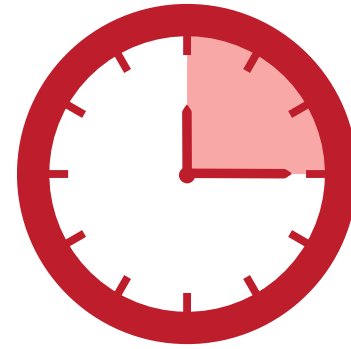


15 Minuten
warten

Testergebnis
ablesen.

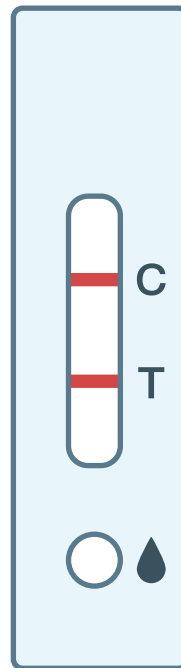

positiv

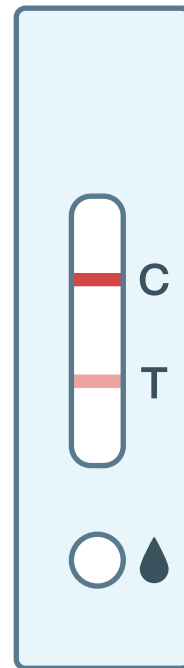


negativ



ungültig

10

Testutensilien
entsorgen.

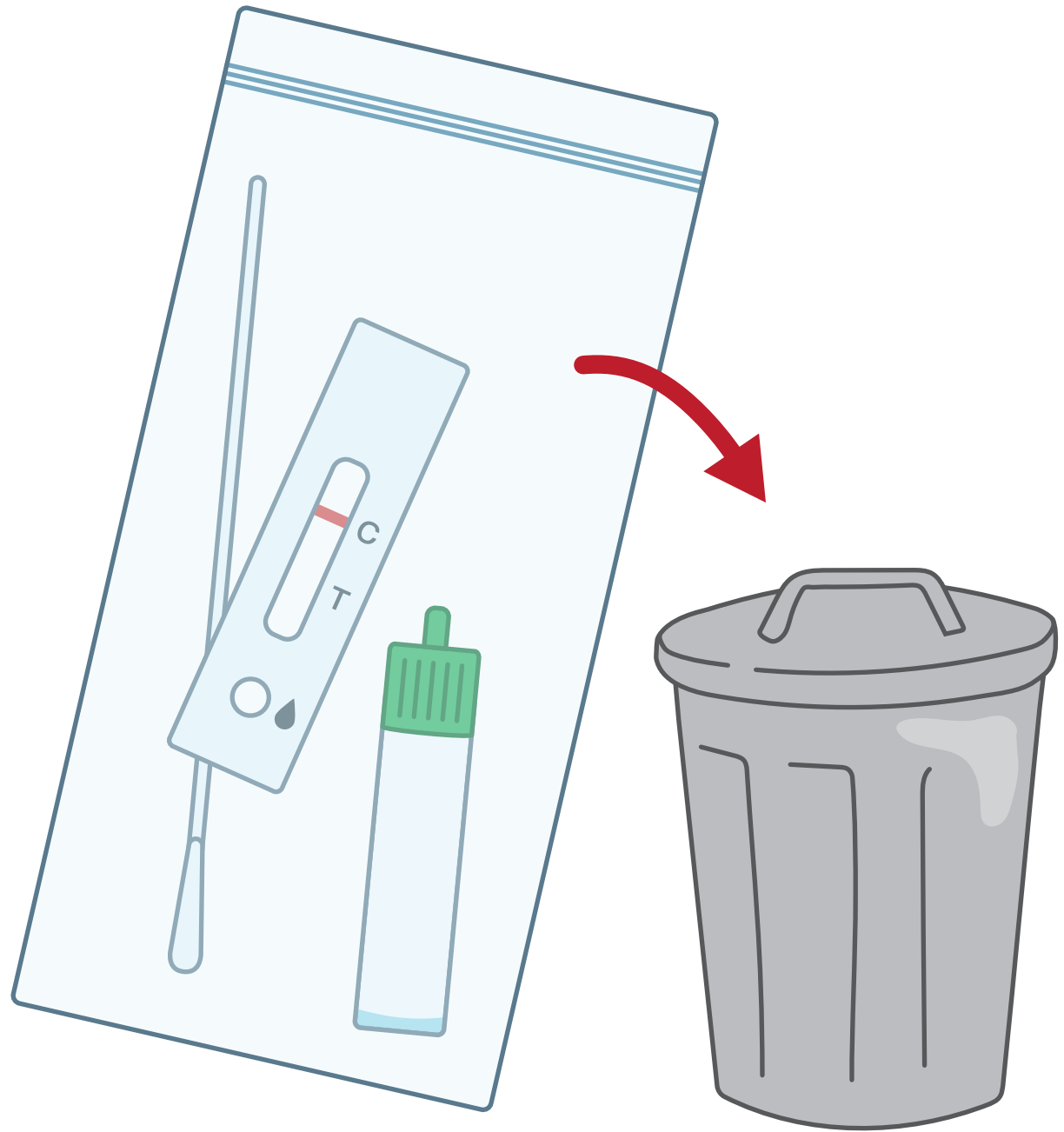

11

Die Hände
waschen oder
desinfizieren.

